

LÁPIZ PARA ELECTROCAUTERIO



Covidien ofrece una amplia gama de piezas de mano y accesorios electroquirúrgicos, que incluyen lápices. Corte y coagulación de tejidos, también se usa para cirugía mínimamente invasiva para la realización de biopsias, disecciones y/o recuperaciones en procedimientos que implique cortes de tejido. Bajo ninguna condición los lápices de electrocirugía son usados directamente por los pacientes dado que su uso es exclusivo para personal médico capacitado en electrocirugía.

Características

- Frecuencia de uso: Dispositivo no reutilizable. De un solo uso
- Carga microbiológica: Lápiz electrocirugía: Estéril
Método de esterilización: Esterilización a baja temperatura con dióxido de etileno
- Tiempo de vida útil: 3 años bajo condiciones recomendadas de almacenamiento.
- Riesgo en la salud: Puede causar heridas accidentales. una vez que esté conectado a la fuente de energía eléctrica, puede causar quemaduras. Verificar conexión y posición de la placa, probar lápiz de electrocirugía antes de usar en el paciente.

Advertencia

- El acero inoxidable se decolorará y presentará corrosión cuando se expone a sustancias químicas con concentración mayores a las recomendadas.
- El electrodo neutro debe estar colocado en una zona de gran masa muscular y completamente adherido a la piel, al fin de utilizar toda su área y así reducir al mínimo el efecto de la corriente en dicha zona. Si no tuviera un buen contacto, se formarán pequeñas “islas” con alta densidad de corriente, produciendo quemaduras en la piel o tejido.



Presentación

Caja x 100 unidades