

# PLEXITRÓN



## Características

- Equipo para irrigación con cámara de goteo.
- Para usar con bolsa de solución para irrigación.
- Superficies internas estériles y no pirogénicas.
- No use si las fundas protectoras no están en su lugar.
- Almacénese en lugar fresco y seco.

## Componentes

- Funda: Polietileno de baja densidad (LDPE)
- Conector: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
- Cámara: Policloruro de vinilo (PVC)
- Marco- llave: Polietileno de alta densidad (HDPE)
- Adaptador: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
- Tubo: Silicona
- Tapa: Polietileno de baja densidad (LDPE)

## Instrucciones de uso

Use técnica aséptica

1. cierre la llave
2. Retira la funda protectora del conector
3. Inserte el conector en la bolsa de solución para irrigación.
4. Abra la llave, llene el equipo y elimine las burbujas de aire.
5. Cierre nuevamente la llave
6. Remueva la tapa del adaptador universal de látex y acople al Resectoscopio o Cistoscopio.
7. Para iniciar el procedimiento abra la llave.



## Presentación

Empacado en unidad