

STERI-STRIP 1546

Sutura cutánea adhesiva para el cierre primario de la piel



Tiras adhesivas estériles compuestas de tela de papel microporoso y filamentos de poliéster que se utilizan para afrontar heridas de corte, cumpliendo el rol de puntos de sutura. De esta manera permite el cierre de la piel de forma fácil y rápida.

Aplicación

- Limpie y seque la piel circundante.
- Una vez fuera del envase, saque el borde prepicado y retire la sutura adhesiva en un ángulo de 90° para que no se adhiera sobre si misma.
- Comience a aplicar las suturas adhesivas desde el centro de la herida hacia los bordes.
- Presione fuertemente un extremo de la sutura, y luego afronte borde de la herida para luego adherir la otra mitad de la sutura. No la aplique con tensión.
- Los bordes de la herida deben ser afrontados con precisión y una distancia de 3 a 5 mm

Beneficios

- Deja menos cicatrices en comparación con las grapas y las suturas.
- Mejora la comodidad para el paciente y tiene una menor posibilidad de que se produzcan infecciones que al aplicar suturas o grapas.
- Aplicación rápida.
- Ayuda a incrementar la resistencia de la herida a la tensión establecida entre los bordes del tejido



Presentación

Caja x 50 unidades
Cada sobre contiene 10 tiras
Tamaño 6mm x 100 mm