

LANCETA RETRÁCTIL



El dispositivo de punción Accu-Chek®Safe-T-Pro Uno cumple con los requisitos de seguridad e higiene que establecen las autoridades de la salud, los legisladores y las instituciones sanitarias. A su vez, brinda una punción ergonómica en solo 3 milisegundos y otras características de seguridad que previenen pinchazos accidentales. La profundidad predeterminada del pinchazo hace que el dispositivo esté listo para ser utilizado de inmediato. Punción simple, en dos pasos

1. Dé un giro de un cuarto a la tapa de esterilidad y retírela.

2. Sostenga el dispositivo de punción con los dedos pulgar, índice y mayor. Presione el dispositivo de punción con firmeza en el sitio elegido para realizar la punción. Utilizando el pulgar, presione el botón de mando hasta el fondo. Retire el dispositivo de punción del sitio donde se realizó el pinchazo y deséchelo.

Especificaciones

- Profundidad de penetración 1,5 mm
- Aguja siliconada
- Retracción automática
- Manipulación intuitiva

Características

- Listo para utilizar, con una configuración predeterminada de profundidad
- Tecnología Safe-T garantiza que la aguja siempre se guarde de forma segura
- Al mantener la aguja almacenada, se previenen pinchazos accidentales
- Ergonómico y sencillo de sujetar para una manipulación segura
- Higiénico; cada lanceta solo puede ser utilizada una vez
- Aguja biselada y diámetro pequeño para que la obtención de muestras de sangre sea prácticamente indolora
- Apto para personas zurdas y diestras
- Luego de un único uso, se desecha el dispositivo de punción completo



Presentación

Caja por 200 lancetas