

# CLAMP UMBILICAL



Grapas Esterilizadas con doble broche de seguridad, resistente y no lesiona los tejidos durante su uso. Previene la infección umbilical y complicaciones posteriores por curas incorrectas con el clamp umbilical, que favorece la caída del ombligo del recién nacido. Bioclamp está fabricado en polipropileno apto para uso clínico hospitalario. Su uso no permite el sangrado en el recién nacido, a diferencia del uso de la cinta.

## Características

- Doble seguro de cierre previene la apertura accidental.
- Fácil manipulación para la adecuada sujeción del cordón.
- En sobre individual que garantiza la esterilidad e integridad del producto.
- De tamaño adecuado, no deslizable, descartable, estéril y atóxico.

## Objetivos

- Prevenir la infección umbilical y complicaciones posteriores por curas incorrectas. Favorecer la caída del ombligo, la cual se produce al quinto u octavo día. En cesáreas entre doce y quince días.
- Informar y estimular a la madre sobre la higiene y cuidado del ombligo y fomentar el bienestar al lactante.

## Indicaciones de uso

- Lavado de las manos.
- Coger una gasa estéril por las 4 puntas de forma que nuestros dedos no toquen la parte central del clamp.
- Impregnación del alcohol de 70 grados en la zona central del ombligo.
- Limpiar el ombligo con un movimiento de rotación alrededor del mismo.
- No cubrir con gasa el ombligo para favorecer su desprendimiento. El cordón se seca mas rápido, cuando está más en contacto con el ambiente.
- Una vez desprendido el cordón, continuar la cura con el alcohol de 70 grados durante dos a tres días hasta que cicatrice.

## Presentación



Caja por 25 unidades

Presentaciones por color (rosado, celeste y blanco).