

VENDA DE YESO

Las vendas de yeso consisten de un tejido de algodón impregnado con sulfato de calcio seco. es una tela de gasa de algodón adherido y recubierto con un polvo blanco de yeso bien distribuido, con cortes planos sin fibras. La venda debe es maleable y no contiene masa ni grumos.

Inmoviliza la zona lesionada para facilitar la alineación y el proceso de curación del hueso, evitando así que se use o mueva la zona lesionada.

Características

- Fraguado extra rápido.
- Vendaje de acabado liso, sin grumos.
- Su textura permite una buena distribución.
- Por su excelente capacidad de absorción no debe sumergirse más de 5 segundos en el agua.

Almacenamiento

- No almacenar a condiciones extremas de temperatura y humedad.
- Almacenar en lugar fresco y seco
- Evitar la exposición a la luz solar directa



Instrucciones de uso

- Sumergir la venda en agua a 20 – 25°C durante 2 – 5 segundos.
- No añadir ni acelerantes ni reductores del tiempo de fraguado en el agua.
- Escurrir la venda suavemente.
- Esperar unos 30 minutos después de la realización del molde antes de movilizar al paciente

Precauciones

- No usar si el empaque está abierto o dañado.
- No estéril.
- De un solo uso.
- Desechar después de usar.



Presentación

Empacados en unidades