

# BOLSA DE SUCCIÓN QUICK-FIT



Destinado para su uso con equipo de succión para permitir la recogida y eliminación de fluidos corporales u otros materiales extraídos durante procedimientos quirúrgicos o médicos.

## Precauciones

- La bolsa recolectora es para un solo uso. El depósito exterior es reutilizable.
- Utilice siempre una bolsa recolectora y depósito exterior de colores concordantes.
- El contenido de la bolsa se considera material potencialmente peligroso; manipule en consecuencia y utilice equipo de protección personal (PPE) adecuado.
- No aplique vacío continuo durante más de 24 horas.
- Compruebe la fecha de vencimiento sobre la tapa de la bolsa para utilizarla dentro del período de validez.
- Almacene en un lugar oscuro. La exposición prolongada a la luz podría afectar el rendimiento del producto y dar lugar a roturas durante el uso.
- Limpie el depósito exterior con una solución de lejía/cloro al 10% o de alcohol al 10% después de cada uso. No use limpiadores a base de acetona.

## Especificaciones

- Bolsa corrugada transparente desechable, antideslizante, de alta resistencia, c/tapa adjunta para succión y eliminación de líquidos.
- Material de polietileno de baja densidad c/tapa adjunta de polipropileno de alta densidad, para succión y eliminación de líquidos
- De fácil instalación
- No permite el contacto con los fluidos
- Filtro bacteriano Aerostat, tiene una eficiencia de filtración del 99,98% de microorganismos y partículas de aerosol.
- Sistema de cierre Hi-flow para mayor seguridad (Válvula de cierre mecánico evita el desbordamiento y la contaminación). Permite trabajar en circuito cerrado



## Presentación

Empaque por unidad  
Cja por 50 unidades