



**UNIMEDIC**  
UNIVERSO MÉDICO PERUANO

# STERI-STRIP 1541

Sutura cutánea adhesiva para el cierre primario de la piel



Proporciona soporte a la herida y aumenta la fuerza de resistencia a la tensión de la herida comparada con las suturas.

Su diseño no invasivo reduce la formación de una cicatriz y el riesgo de infección al compararlo con las suturas y grapas; minimizando el traumatismo del tejido y proporcionando mejores resultados cosmético.

## Aplicación

- Limpie y seque la piel circundante.
- Una vez fuera del envase, saque el borde prepicado y retire la sutura adhesiva en un ángulo de 90° para que no se adhiera sobre si misma.
- Comience a aplicar las suturas adhesivas desde el centro de la herida hacia los bordes.
- Presione fuertemente un extremo de la sutura, y luego afronte borde de la herida para luego adherir la otra mitad de la sutura. No la aplique con tensión.
- Los bordes de la herida deben ser afrontados con precisión y una distancia de 3 a 5 mm

## Beneficios

- Deja menos cicatrices en comparación con las grapas y las suturas.
- Mejora la comodidad para el paciente y tiene una menor posibilidad de que se produzcan infecciones que al aplicar suturas o grapas.
- Aplicación rápida.
- Ayuda a incrementar la resistencia de la herida a la tensión establecida entre los bordes del tejido



## Presentación

Caja x 50 unidades  
Cada sobre contiene 3 tiras  
Tamaño 6 mm x 75mm