

TEGADERM

Apósito transparente



3M Tegaderm es una línea de apósitos transparentes estériles. Están formados por un film de poliuretano semipermeable. Poseen un marco de descarga que facilita su aplicación. 3M Tegaderm es una barrera semipermeable, que permite el ingreso de O₂ y la salida de CO₂ y vapor de agua.

Es versátil, su uso puede ser para el tratamiento de heridas o para la fijación y protección del sitio intravenoso. Apósitos de fácil y rápida aplicación tanto para profesionales de la salud como para cuidadores.

Adhesión balanceada de excelente desempeño que cuida la piel del paciente.

Beneficios

Optimizan la cicatrización de las heridas. Mejora los resultados clínicos y la comodidad del paciente. El apósito Tegaderm retiene los componentes naturales de la cicatrización de las heridas para mantener un ambiente húmedo. Permite la monitorización visual permanente del sitio IV y de la herida. Puede ser usado como apósito primario o secundario, para retener otros apósitos en la herida como por ejemplo: Hidrogel, Alginato, etc.

Aplicación

Las aplicaciones para la protección de la piel y el cuidado de las heridas incluyen:

- Incisiones quirúrgicas limpias y cerradas.
- Zonas donadoras de injertos cutáneos.
- Úlceras por presión en estadio I o II.
- Heridas superficiales, como abrasiones cexudado escaso, desgarros cutáneos y ampollas.
- Quemaduras de primero y segundo grado
- Apósito protector para prevenir el daño a la piel del roce y fricción.
- Apósito secundario sobre gasas, alginatos o hidrogeles.

Presentación

Código de producto	Tamaño/unidad	Presentación	Unidades
1622W	4.4 cm x 4.4 cm	Caja	100
1624W	6 cm x 7 cm	Caja	100
1626W	10 cm x 12 cm	Caja	50
1627W	10 cm x 25 cm	Caja	20
1628W	15 cm x 20 cm	Caja	10