

# Indicador químico para ciclos de esterilización de vapor

Las tiras indicadoras 3MMR ComplyMR 1250 consisten en un tinte químico impreso en una tira de papel. El tinte está impreso como dos tiras largas separadas en el centro de la tira con un color estándar negro de referencia, y una línea punteada con perforaciones para separarlas fácilmente en dos tiras indicadoras. El color del indicador cambia de un amarillo claro a negro cuando se cumplen más de una de las condiciones de esterilización en procesos de vapor a gravedad y asistidos con vacío a 121° y 132°C.

## Indicaciones de uso

Utilizar como indicadores químicos internos para monitorear la exposición a las condiciones de esterilización con vapor dentro de los paquetes para todos los ciclos de gravedad y prevacío.

## Contradicciones

No utilizar los indicadores químicos ComplyMR 1250 en ciclos de esterilización por calor seco, óxido de etileno u otras tecnologías a baja temperatura; ni como reemplazo a los indicadores biológicos.

## Funcionamiento

El color amarillo claro de la tira indicadora cambia a un color café oscuro y luego finalmente a un color negro, después de la exposición al vapor saturado, tiempo y temperatura.



## Presentación

480 unidades por caja