

# DETERGENTE ENZIMÁTICO ALKAZYME



Desarrollado científicamente para el lavado de todo tipo de dispositivos médicos, equipos biomédicos, insumos médicos, instrumental y materiales médicos que sean parte de procedimientos. Alkzyme limpia y desinfecta eliminando totalmente la materia orgánica contaminante presente en derrames y en toda clase de superficies de dispositivos.

## Beneficios

- Inicio de acción inmediato, efecto bactericida, virucida, fungicida, esporicida y actividad contra priones.
- Su pH alcalino actúa sobre la estructura interna de la biocapa, optimizando sus propiedades de limpieza.
- Su presentación en polvo le confiere mayor estabilidad, rendimiento y mejora su eficacia enzimática.
- El instrumental lavado con Alkzyme no necesita desincrustantes, debido a que su acción enzimática detergente elimina las proteínas secas, desincrusta los residuos y desprende la biocapa.
- Sus secuestrantes calcáreos capturan los minerales del agua, previniendo la formación de depósitos y evitando la mineralización de la biocapa.

## Modo de uso

- Abra y desmonte el instrumental, el material o los dispositivos médicos antes de iniciar el proceso de lavado.
- Sumerja completamente los dispositivos en la solución
- Deje actuar durante 15 minutos
- Retire los dispositivos sumergidos y enjuague con abundante agua potable, una vez finalizado el tiempo de inmersión
- Proceda con el secado de los dispositivos, si es el caso.
- DETERGENTE ENZIMÁTICO ALKAZYME es ideal para: Dispositivos difíciles de lavar. Instrumental quirúrgico. Instrumental ortopédico. Instrumental odontológico. Material de endoscopia. Superficies hospitalarias y más



## Presentación

Paquete de 12 dosis hidrosolubles de 20 g cada una.