

NEX CLOREX C2



Nex Clorex C2 cepillo/esponja CHG 4%, es un cepillo-esponja de limpieza quirúrgico, de un solo uso, con limpa uñas; impregnado con aproximadamente 20 ml de solución antiséptica de limpieza (Digluconato de Clorhexidina)

Características

- Forma ergonómica para permitir un perfecto agarre
- ALta flexibilidad del cepillo para fregar y asegurar una limpieza precisa para manos.
- Cerdas suaves que dañan la piel
- Color del líquido: rosado
- No reutilizable
- Libre de látex
- Libre de partículas extrañas, rebabas o aristas cotantes
- Condición biológica: no tóxico, no irritante, hipoalergénico
- Dimensiones: Ancho 45 mm / Largo 90 mm / Altura 35 mm

Condiciones de almacenamiento

Mantener los recipientes cerrados antes de la utilización. Mantenga el producto en un lugar frío, lejos de la luz solar directa.

Modo de uso

- Mojarse las manos y antebrazos con agua.
- Limpie debajo de las uñas con limpiador de uñas
- Restregar durante al menos 3 minutos, prestando especial atención a las uñas, las cutículas y los espacios interdigitales.
- Enjuague y repita el restregado
- Deseche el cepillo/esponja
- Enjuagar bien las manos y los antebrazo y seque con un paño estéril

Advertencias y precauciones

- No utilizar en personas sensibles a sus componentes
- Evite el contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel
- En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico, y muéstrele la etiqueta o el envase



Presentación

Blíster individual conteniendo un cepillo - esponja y un limpiador de uñas