



UNIMEDIC
UNIVERSO MÉDICO PERUANO

MICROPORE

Cinta quirúrgica de papel microporosa



Cinta adhesiva microporosa, no oclusiva, para uso general. Respaldo no tejido de fibras 100% de rayon color blanco, suaves y flexibles. Adhesivo hipoalergénico, a base de acrilato, sensible a la presión, impregnada uniformemente en una de sus caras con sustancia adhesiva incolora. Hipoalergénica, atóxica, aséptica y libre de látex.

Aplicación

- Usos:
 - Asegurar tubos y dispositivos médicos voluminosos.
 - Anclaje de apósitos de mayor volumen.
 - Inmovilizar dedos.
 - Fijación de férulas.
- Aplique la cinta sin tensión, desde el centro de la aplicación hacia fuera, de manera suave pero haciendo presión sobre la piel para maximizar la adhesión. La cinta debe extenderse al menos 2,5 cms desde el borde del apósito o tubo.
- Para retirarla la cinta: desprender un extremo de la cinta aplicada y desde este retirar en 180° a favor del crecimiento del vello, sosteniendo la piel donde estaba adherida la cinta. Hágalo de forma suave para minimizar el daño en la piel frágil.

Beneficios

El soporte exterior de 3M Micropore permite que la piel elimine la humedad, y permanezca por períodos largos de tiempo.

3M Micropore es una cinta suave y amable con la piel, por lo que se recomienda su uso en pacientes pediátricos y añosos.

La cinta 3M Micropore aumenta su adhesividad al interactuar con la humedad de la piel del paciente al pasar el tiempo.

Presentación

Código de producto	Descripción	Presentación
1530-1	MICROPORE Blanca 1" x 9.10 mt	12 rollos x Caja
1530-2	MICROPORE Blanca 2" x 9.10 mt	6 rollos x Caja