

LÍNEA CLARA PARA BOMBA DE INFUSIÓN



Son usadas en terapia de infusión para tratamiento de un paciente con soluciones de infusión administradas por vía intravenosa para permitir la recuperación de un paciente o la mejoría de su enfermedad. Conjunto de solución CONTINU-FLO con punta no ventilada, 2 válvulas activadas LAR CLEARLINK, válvula de retención y adaptador Luer Lock macho con collar retráctil. Aproximadamente 10 gotas / ml. Longitud aproximada 96 "(2.4 m). Sin DEHP. La ruta del fluido es estéril, no pirogénica.

Especificaciones

- Fabricante: Baxter
- Marca: Clearlink
- Longitud. 96 " (2.4 m)
- 10 Gotas por ml
- Número de sitios Y: 2
- Tipo de tubo: Sin DEHP
- Ruta de fluido estéril
- Válvula de retroceso. Sí
- Solo Rx: Sí
- Tipo de collar: retráctil
- Uso único para evitar la contaminación cruzada

Precauciones

Evitar que el aire se quede atrapado en el set. La perforación de los componentes del set pueden causar embolia de aire. No frotar la superficie de la válvula activada por Luer cuando la pinza de flujo descendiente se encuentra cerrada o cuando la válvula esté suspendida. Puede producirse una frotación no efectiva. Se debe reemplazar el set si la válvula se mantiene suspendida. No acceder la válvula activada por Luer con agujas o cánulas. Intentar dicho acceso dañará el producto, reemplazar de inmediato.



Presentación

Empaque por unidad