



**UNIMEDIC**<sup>®</sup>  
UNIVERSO MÉDICO PERUANO

# DURAPORE

Cinta quirúrgica de alta resistencia con  
textura similar a la seda



Cinta quirúrgica de tafetan (similar a seda), de alta resistencia y adhesivo hipoalergénico de acrilato. Su soporte exterior permite realizar corte bidireccional sin el uso de tijeras.

3M Durapore es sensible a la presión y con adherencia inicial alta desde el inicio de la aplicación. La cinta quirúrgica es libre de látex y resistente al agua

## Aplicación

- Usos:
  - Asegurar tubos y dispositivos médicos voluminosos.
  - Anclaje de apósitos de mayor volumen.
  - Inmovilizar dedos.
  - Fijación de férulas.
- Aplique la cinta sin tensión, desde el centro de la aplicación hacia fuera, de manera suave pero haciendo presión sobre la piel para maximizar la adhesión. La cinta debe extenderse al menos 2,5 cms desde el borde del apósito o tubo.
- Para retirara la cinta: desprender un extremo de la cinta aplicada y desde este retirar en 180° a favor del crecimiento del vello, sosteniendo la piel donde estaba adherida la cinta. Hágalo de forma suave para minimizar el daño en la piel frágil.

## Beneficios

3M Durapore tiene una alta resistencia que asociada a su poderosa adhesión, esto permite un buen desempeño para fijar dispositivos médicos críticos. Además es altamente versatil lo que facilita su uso en muchas intervenciones clínicas críticas. 3M Durapore es sensible a la presión y con adherencia inicial alta desde el inicio de la aplicación. La cinta quirúrgica es libre de látex y resistente al agua. La cinta 3M Durapore se desempeña con buena adhesión a la piel seca.



## Presentación

Caja x 6 rollos  
Tamaño 5 cm x 9.1 mts