



UNIMEDIC
UNIVERSO MÉDICO PERUANO

AEROCÁMARA ADULTO



La aerocámara para adulto es un dispositivo espaciador de medicamentos en aerosol (inhaladores). Su función es producir un espacio donde se retenga y extiendan las micropartículas de medicamento emitidas por el inhalador, ayudando a una mejor asimilación del producto.

También llamadas espaciadores este dispositivo ha sido diseñado para ser utilizado junto a su inhalador, para ayudar a administrar el medicamento a los pulmones donde sea necesario. Entre sus ventajas podemos señalar:

Eficacia: El ajuste del cartucho a la aerocámara permite que el inhalador esté más alejado de la boca del paciente, lo que reduce la cantidad de medicamento que queda en la orofaringe, evitando casos de candidiasis y disfonía. Refuerza una mayor entrega del medicamento al pulmón, lo que admite un mayor aprovechamiento de la dosis y una notable eficacia del tratamiento con inhaladores.

Precisión: Impide el riesgo de descoordinación entre el inicio de la respiración y la pulsación del inhalador presurizado. Beneficia la adecuada llegada de las partículas inhaladas hacia la vía aérea y por ende evita que sean deglutidas.

Seguridad: El uso de la aerocámara reduce los efectos desfavorables que pueda producir un inhalador de dosis medida.

Indicaciones de uso

- El paciente debe estar sentado o de pie, con una leve extensión del cuello
- Agite el inhalador 5 veces. Retire la tapa del inhalador.
- Coloque el inhalador en la aerocámara, siempre en posición vertical.
- Ponga la máscara facial en la cara del paciente, abarcando la nariz y la boca, asegurándose que quede bien sellado. Pulse 1 vez el inhalador.
- Mantenga puesta la máscara por 10 segundos, mientras el paciente respira tranquilo. Retire la aerocámara.
- En caso de requerir 2 inhalaciones esperar 1 minuto entre una y otra.
- Retire el inhalador de la aerocámara y coloque la tapa



Presentación

Caja por unidad