

# TRANSPORE

**Cinta quirúrgica de plástico transparente de corte bidireccional**



Cinta adhesiva de plástico microperforado, hecho de polietileno flexible y transparente, que permite observar la piel debajo de la cinta. Adhesivo hipoalergénico a base de acrilato, sensible a la presión, fuerte adhesión, resistente al agua, de fácil remoción y que no deja residuos. El adhesivo al usarse no se separa de la cinta de plástico. Se adhiere adecuadamente a la piel y al retirarse es de fácil desprendimiento y no deja residuos ni daña la piel. El esparadrapo no se deforma al corte. De fácil rasgado manual en sentido longitudinal y transversal.

## Aplicación

- Limpie y seque la piel circundante.
- Una vez fuera del envase, saque el borde prepicado y retire la sutura adhesiva en un ángulo de 90° para que no se adhiera sobre si misma.
- Comience a aplicar las suturas adhesivas desde el centro de la herida hacia los bordes.
- Presione fuertemente un extremo de la sutura, y luego afronte borde de la herida para luego adherir la otra mitad de la sutura. No la aplique con tensión.
- Los bordes de la herida deben ser afrontados con precisión y una distancia de 3 a 5 mm

## Beneficios

- Menos cambios innecesarios de cinta y por lo tanto menos manipulación del sitio lo cual disminuye el riesgo de infección
- Al removerse el adhesivo no deja residuos sobre la piel.
- Brinda una fijación segura y constante.
- Al permitir la transpiración de la piel, no causa maceración.
- Fácil de aplicar con guantes
- Mantiene su adhesión aun cuando se moja.
- Menos cambios de cinta. Cómoda
- Fácil de usar.

## Presentación

Código de producto	Descripción	Presentación
1527-1	TRANSPORE 1" x 9.10 mt	12 rollos x Caja
1527-2	TRANSPORE 2" x 9.10 mt	6 rollos x Caja
1527-3	TRANSPORE 3" x 9.10 mt	4 rollos x Caja