

# TUBO DE MAYO



Tubo de mayo o Cánula de Guedel, tubo bucofaríngeo que mantiene la vía aérea permeable y se utiliza para la administración de oxígeno o gases anestésicos introduciéndolo por la boca. Cánula transparente de superficie lisa y anillo mordedor de color verde para evitar la oclusión accidental. Es un simple tubo orofaríngeo curvo y semirrígido de material plástico, que introducido en la boca del paciente, mantiene expeditiva la vía aérea, impidiendo que la lengua y la musculatura faríngea obstruyan el paso del aire. No sólo ayuda a regatear a la muerte, sino que es un elemento imprescindible para eludir las graves lesiones que se producen cuando se corta durante varios minutos el suministro de oxígeno al cerebro. El tubo no tiene ningún mecanismo extraño, simplemente actúa para liberar las vías que quedan obstruidas al tragar la lengua y de inmediato aporta respiración y alivio.

## Técnica

- Abrir la boca al paciente
- Mantener en hiperextensión la cabeza
- Deslizar por el paladar hasta introducir la mitad de la cánula
- Se gira 180° y se sigue introduciendo hasta la pared orofaríngea

## Características

- De Plástico PVC, grado médico atóxico.
- Libre de látex, biocompatible, antiadherente.
- Estéril y apirógeno
- Cánula transparente de superficie lisa y anillo mordedor para evitar la oclusión accidental.
- Esterilizado con gas oxido de etileno

## Precauciones

- No utilizar si el empaque se encuentra abierto, roto o vencido.
- Desechar el producto una vez utilizado



## Presentación

Empacado en unidad estéril  
Calibres 0-1-2-3-4-5.